

clearcorrect

Jednostavan vodič kroz ClearCorrect



Hvala što ste preuzeли ClearCorrect besplatni priručnik “ Jednostavan vodič kroz ortodonciju”



Pripremili smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da saznate da li bi ClearCorrect mogao biti prava odluka za Vas.

Ako vam se sviđa pojam ClearCorrecta - našeg diskretnog mobilnog prozirnog alignera – potražite pružatelja usluga u vašem području, Vašeg ClearCorrect stomatologa.

A ako želite vidjeti što točno može učiniti za vaš osmijeh, svakako posjetite www.myclearcorrect.com gdje možete isprobati virtualni ClearCorrect osmijeh pomoću naše Vision aplikacije.

Nadamo se da volite ClearCorrect koliko i mi. Što god odlučili učiniti, želimo vam puno sreće na putu ispravljanja zuba!



The ClearCorrect Team



"Imam zbijene
zube koji se
preklapaju."

"Želim pronaći
pristupačno
rješenje."

"Ne sviđa mi se
razmak između
zuba."

Nepravilno postavljeni zubi (malokluzija) mogu biti uzrok raznih neugodnih simptoma poput glavobolje, boli u čeljusti, problema s disanjem, promjena u govoru i više.

Razlozi zbog kojih se većina pacijenata odlučuje za ispravljanje zuba obično su estetski. Praznine, zbijenost, neusklađenost i drugi ortodontski problemi mogu učiniti da se osjećate kao da želite sakriti inače lijep osmijeh.

Nije važno koliko se takvi problemi drugima čine beznačajnima - ako Vama smetaju, zašto ne potražiti tretman.

Da li zaista trebam ispravljanje zuba?

"Ne sviđa mi se
izgled metalnih
bravica u ustima ."


"Možda sam
prestar za
ortodontski
aparatić."

"Nisam siguran
u svoje opcije."



Ako vam je neka od ovih misli poznata, ClearCorrect bi mogao biti rješenje koje ste čekali.

Šta je ClearCorrect ?

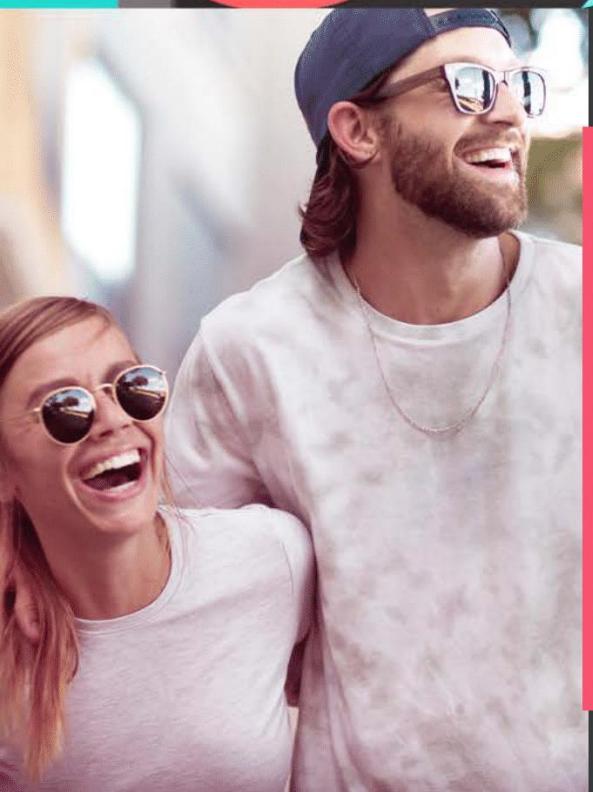

ClearCorrect zamjenjuje čelične bravice i žice nizom prilagođenih, uklonjivih prozirnih alignera.

Aligneri pružaju nježan ciljani pritisak na osmijeh, a svaki novi koji nosite dovodi zube bliže njihovom savršenom položaju.

To je nježniji i diskretniji pristup postupnom pomicanju zuba u estetski ugodniji položaj.

ClearCorrect može..

- ✓ Poravnati Vaše zube
- ✓ Ispraviti zube koji se preklapaju
- ✓ 'Zarotirati' zube u ispravan položaj
- ✓ Pomjeriti zube prema gore ili dolje da se poravnaju
- ✓ Poboljšati Vaš zagriz
- ✓ Zatvoriti neželjene praznine
- ✓ Učiniti Vaš osmijeh širim




ClearCorrect je..




Diskretan

Samo rijetki će primijetiti da nosite aligner.

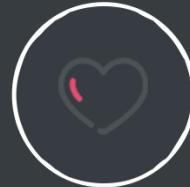

Udoban

Naporno smo radili kako bismo naš aligner učinili jednim od najudobnijih.

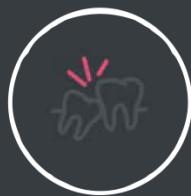

Svestran

ClearCorrect rješava širok raspon ortodontskih problema od jednostavnih do složenih.



Mobilan

Uklonite svoj aligner prije jela, četkanja zuba i čišćenja koncem. Kako praktično!



Jednostavan za čišćenje

Hrana se neće zaglaviti u aligneru.



Brz i učinkovit

ClearCorrect radi. Aligner ima izuzetnu stopu uspješnosti ispravljanja nepravilnosti za samo osam mjeseci.

Vaše ClearCorrect putovanje



Pronađite ClearCorrect stomatologa

U našem laboratoriju izrađujemo alignere na temelju zahtjeva akreditovanih stomatologa. Ukoliko vaš stomatolog ne nudi ClearCorrect, vjerojatno postoji jedan u blizini koji ih nudi.

Dobijte procjenu


Vaš stomatolog pregledat će Vaš karton, fotografirati i procijeniti Vaš osmijeh. Ako ste dobar kandidat za ClearCorrect, oni će skenirati ili uzeti otiske Vaših zuba, kako bismo mogli izraditi Vaše prilagođene alignere.



Vaš tretman



Sada se događa magija. Alignere morate nositi 22 sata dnevno i ubrzo ćete vidjeti poboljšanje. Vaš ClearCorrect stomatolog će redovito provjeravati odvija li se liječenje prema planu i osigurati vam zamjenske alignere kada ih trebate. Naravno, svaki je osmijeh drugačiji, ali konačne rezultate trebali biste vidjeti za otprilike 8-14 mjeseci.

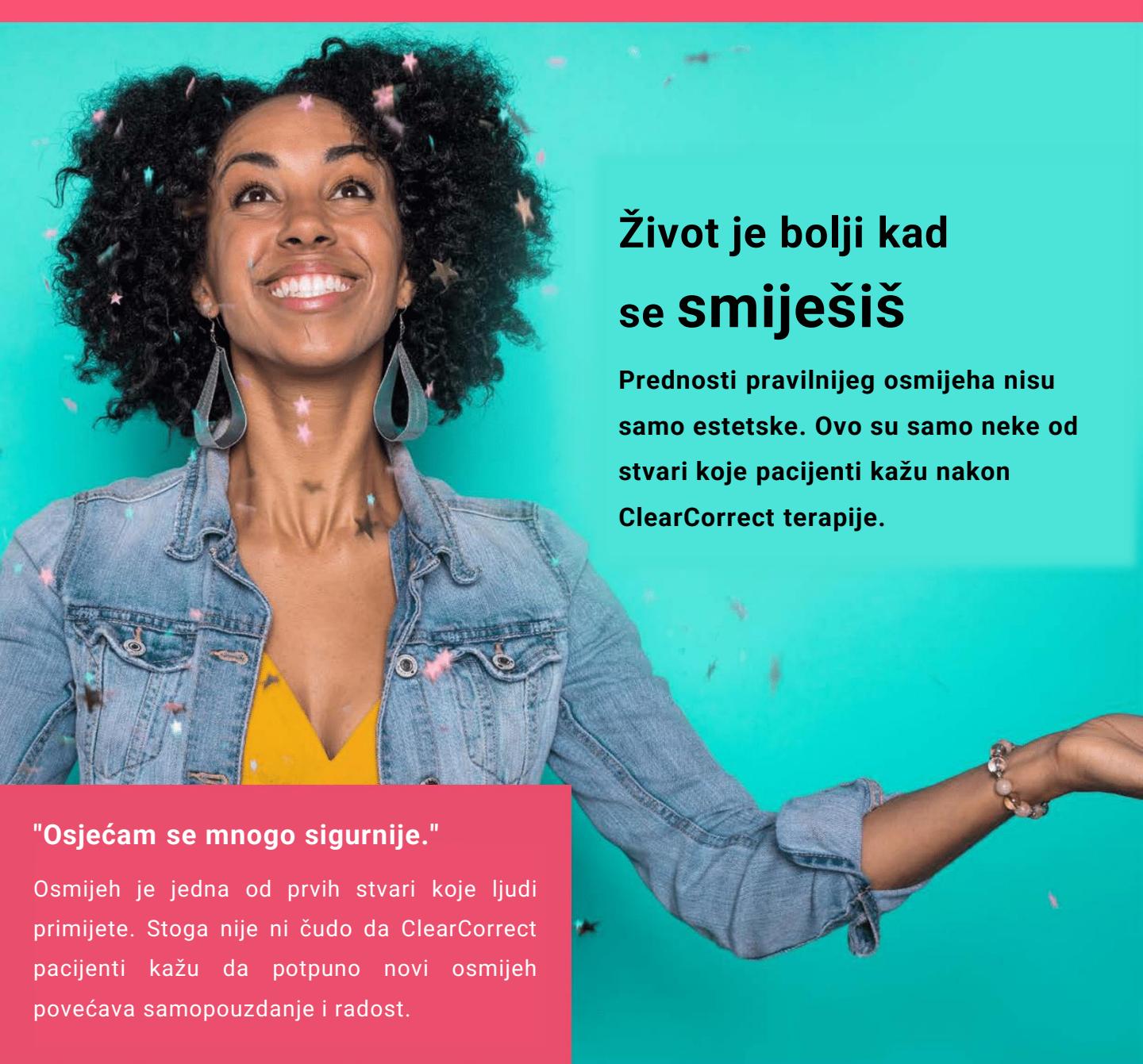

Život je bolji kad se **Smiješi**

Prednosti pravilnijeg osmijeha nisu samo estetske. Ovo su samo neke od stvari koje pacijenti kažu nakon ClearCorrect terapije.

"Osjećam se mnogo sigurnije."

Osmijeh je jedna od prvih stvari koje ljudi primijete. Stoga nije ni čudo da ClearCorrect pacijenti kažu da potpuno novi osmijeh povećava samopouzdanje i radost.

"Moje zube je lakše čistiti sada kada su prostori između zuba nestali."

Praznine između zuba mogu utjecati na više toga, ne samo na samopouzdanje. hrana koja zaostaje u praznim prostorima može uzrokovati nakupljanje plaka i izazvati druge neugodnosti.

"Moje desni se osjećaju zdravije."

Zdravi zubi znače zdrave desni. Sada je lakše održavati zube zdravima i čistima, a i vaše će desni osjetiti korist.

"Zaustavio sam trošenje zuba."

Malokluzija je jedan od najčešćih uzroka preranog trošenja i gubitka zuba. Prilagodbom zagriza s ClearCorrectom zaustavlja se trošenje zuba.

"Sada konačno mogu dobiti stomatološki tretman koji želim."

Pravilni zubi mogu otvoriti put drugim estetskim tretmanima poput izbjeljivanja i ljuskica.

Često postavljana pitanja



Da li je tretman ugodan?

Dizajnirali smo ClearCorrect da bude među najudobnijim ortodontskim alignerima. Volimo misliti da smo pronašli savršenu ravnotežu između udobnosti i trajanja tretmana.

Nošenje ClearCorrect alignera nije bolno, ali bi vam moglo biti malo neugodno u prvim danima tretmana ili kada prelazite s jednog alignera na drugi. Ako imate iskustva nelagode, ne bi trebalo trajati duže od dan ili dva.

Također možete primijetiti promjene u zagrizu – načinu spajanja gornjih i donjih zuba. Iako to nije bolno, neki pacijenti kažu da se treba malo naviknuti. Promjene zagriza su često prvi znak da vaš ClearCorrect aligner počinje djelovati.

Što duže nosite svoje alignere, osjećaj će biti ugodniji i prirodniji.

Da li su stvarno nevidljivi?

Iako ClearCorrect aligneri nisu potpuno nevidljivi, definitivno ih nije lako uočiti, zahvaljujući prozirnoj plastici medicinske kvalitete koja se koristi za proizvodnju. Većina ljudi neće ni primijetiti da nosite aligner.



Hoće li to utjecati na moj govor?

Neki pacijenti primjećuju promjenu u govoru - obično šuškanje - kada prvi put isprobaju svoj aligner. Brzo će nestati, ali najbolje je izbjegavati velike govore sat ili dva nakon izlaska iz klinike.

Kako mogu očistiti svoje alignere?

Većina alignera može se čistiti četkicom za zube i hladnom vodom. Također se preporučuje neabrazivna pasta za zube. Upute za čišćenje nalaze se na svakoj vrećici novih alignera.

Kakve su to izbočine na mojim zubima?

Ovisno o vašem liječenju, možda će biti potrebno privremeno pričvrstiti engager na zube. Izrađeni su od kompozitnog materijala u boji zuba i tu su da pomognu kod otežanih pomaka zuba. Kad ne nosite alignere, mogu vam biti neugodni u ustima, ali ne brinite, lako ih je ukloniti i koriste se samo kada je to apsolutno neophodno.

Koliko dugo traje tretman?

Vrijeme tretmana ovisi o ciljevima i načinu pomicanja zuba potrebnih za njihovo postizanje. Trebali biste očekivati da će tretman trajati od 8 do 14 mjeseci. Vaš stomatolog će vam dati procijenjeno vrijeme liječenja. Liječenje može potrajati duže ako niste dosljedni u nošenju alignera 22 sata dnevno.

Koje je dnevno vrijeme nošenja?

ClearCorrect aligneri dizajnirani su za nošenje tokom dana i uklanjuju se samo za vrijeme obroka ili za četkanje i čišćenje zubnim koncem. Aligner je potrebno nositi 22 sata dnevno. Ukoliko nosite manje od preporučenog vremena, zubi bi se mogli vratiti u prijašnji položaj, stoga je pridržavanje dnevne rutine ključno za uspjeh terapije.

Hoću li morati nositi retainer?

Baš kao i kod svih drugih ortodontskih sustava, vjerovatno ćete morati nositi retainer nakon tretmana kako biste spriječili povratak zuba. Vaš stomatolog može vam osigurati udoban retainer koji nosite noću dok spavate.

Od čega su napravljeni ClearCorrect aligneri?

Aligneri su izrađeni od poliuretanske smole koja je posebno formulirana za ClearCorrect. Smola je jaka i fleksibilna s fantastičnom otpornošću na pukotine i lomove. Također je otporan na mrlje. Ali najbolja stvar kod poliuretana je njegova prozirnost zbog koje je aligner tako teško uočiti kada ga nosite.

Sadrže li aligneri BPA ili ftalate?

Ne. ClearCorrect aligneri izrađeni su bez BPA ili ftalata. Oni su sigurni, biokompatibilni i odobreni za upotrebu od strane FDA.

Mogu li i dalje nositi ClearCorrect ako sam trudna ili dojim?

Da! ClearCorrect aligneri ne sadrže štetne kemikalije i prikladni su za trudnice ili dojilje. Uvijek pitajte svog stomatologa ako niste sigurni ili imate dodatnih pitanja.

